

Indicação: Produto indicado na limpeza de aparelhos de Autoclave.

USO PROFISSIONAL. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

Aplicação: Remoção de depósitos orgânicos minerais, desincrustante para câmara, válvulas, e tubulações de Autoclaves. Não utilizar em autoclave que contenha tubulações, válvulas ou rosca de cobre.

Periodicidade de uso: Quinzenal.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR OS INSTRUMENTAIS A SEREM ESTERILIZADOS CONJUNTAMENTE COM CLAVE CLEAN.

Modo de usar:

- AUTOCLAVES SEM RESERVATÓRIO DE ÁGUA:

1- Dissolver o conteúdo de 30 g do **CLAVE CLEAN** entre 150 e 400 ml de água destilada e fazer um ciclo curto de esterilização;

***Jamais executar o ciclo de secagem;**

2- Após o término do ciclo de esterilização, anular ou desligar o equipamento;

3- Remover a solução restante da câmara e passar um pano em todo seu interior;

4- Executar novamente o ciclo de enxágüe com água destilada, sem o ciclo secagem;

5- Passar um pano limpo por toda câmara, e utilizar o equipamento normalmente.

- AUTOCLAVES COM TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA:

1- Esvaziar o reservatório de água da Autoclave;

2- Colocar 30 g de **CLAVE CLEAN** e completar com 2.000 ml de água destilada no reservatório;

***Jamais executar o ciclo de secagem;**

3- Iniciar um ciclo de 30 minutos a 121°C, **sem o ciclo de secagem;**

4- Após a conclusão deste ciclo, drenar a solução de limpeza de **CLAVE CLEAN** da câmara e do reservatório;

5- Encher o reservatório com a água destilada e executar 2 (dois) ciclos de 30 minutos de 121°C, sem o ciclo de secagem;

6- Esvaziar o reservatório e aguardar o resfriamento até a temperatura ambiente;

7- Encher o reservatório com água destilada e utilizar normalmente o equipamento.

- NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO:

1- Diluir 30 g de **CLAVE CLEAN** em 150 a 400 ml de água, e com o auxílio de uma esponja macia limpar as bandejas e superfícies internas da câmara de esterilização e secar com um pano limpo.

Precauções: Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto. Manter fora do alcance de crianças. Não ingerir. Em caso de contato com a pele ou olhos enxaguar abundantemente com água. Em caso de irritação procure um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Produto de baixa toxicidade, mas quando queimado libera vapores que causam ardência nos olhos e mucosas.

Composição: Ácido Orgânico Sintético 79,5%.