



ASFER

Indústria Química LTDA

Produzido por:
LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 05.076.414/0001-18
Rua Guarujá, 261 - Jardim Alpino - CEP: 15810270
Catanduva - SP - BR
Angélica Cacciari de Campos
CRF/SP: 41.250
Reg. ANVISA N°: 80533250009

Distribuído por:
Asfer Ind. Química LTDA.
CNPJ: 04.798.379/0001-88
Alameda Araguaia, 180 - Santa Maria - Cep: 09560-580
São Caetano do Sul-SP-Brasil - Sac: (11) 4222-3140
asfer@asfer.ind.br 

INSTRUÇÕES DE USO: PMCC

Conteúdo:

Frasco de vidro âmbar de 7ml

Composição:

P-Mono-Cloro-Fenol 2,00 ml.
Cânfora 12,50 g.
Álcool Etilíco 96° q.s.p 100,00 ml.

Especificações e características técnica do produto:

PMCC é um líquido flúido,

levemente amarelado que escurece no ar, com odor característico predominante de fenóis, isento de particulados. O Para-mono-cloro-fenol-canforado é um bactericida endodôntico possuindo uma baixa tensão superficial, atua por capilaridade agindo, portanto, a distância, na massa dentinária e ramificações do sistema de canal radicular.
pH: 6,0-7,0

Indicação e finalidade:

Utilizado em tratamento endodôntico com efeito bactericida em curativos de demora entre as sessões.

Aplicação correta e segura do produto:

Considerando que este medicamento está indicado somente para casos de necropulpectomias, onde os tecidos periapicais estão preparados para uma possível ação irritante temporária, recomendamos o seu emprego como curativo de demora entre sessões, mesmo que seja necessário colocá-lo em toda a extensão do canal radicular.

Modo de usar:

- 1 - Realizar a abertura coronária sob condições anti-septicas.
- 2 - Secagem do canal radicular através da aspiração e complementação por meio de pontas absorventes estéreis.
- 3 - Seleção do cone de papel que se adapte ao comprimento ideal de tratamento.
- 4 - Umedecer o mesmo em PMCC, removendo o excesso com gase esterilizada, levando-o para o interior do canal radicular.
- 5 - Com uma pinça, tomamos uma bolinha de algodão, deixada de tal maneira que preencha a parte da câmara pulpar.
- 6 - Preencher o restante desta cavidade, bem como a abertura coronária com cimento provisório.

Precauções e Cuidados especiais:

Não utilizar sem antes verificar a inviolabilidade do produto na embalagem. Manipular o material adequadamente levando-se em conta a fragilidade natural do produto. Atentar para as instruções de uso antes de proceder a utilização do material.

Evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares. Mantenha em local seco e fresco ao abrigo de luz. Não ingerir, caso ocorra procurar orientações médicas.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Exclusivamente para uso profissional. Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais. Caso comprovada sensibilidade ao produto, suspender o uso.

Pode ocorrer a sensação de ardência quando em contato com a mucosa, o que é característico do produto.

Em contato com a pele provocará irritações, lavar abundantemente com água.

Atentar para as instruções de uso antes de proceder a utilização do material.

Mantenha em local seco e fresco e ao abrigo de luz.

Exclusivamente para uso profissional.

Contra indicações e advertências:

Não há.

Armazenagem: conservar em temperatura ambiente.

Validade: 24 MESES