



Produzido por:
LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 05.076.414/0001-18
Rua Guarujá, 261 - Jardim Alpino - CEP: 15810270
Catanduva - SP - BR
Angélica Cacciari de Campos
CRF/SP: 41.250
Reg. ANVISA N°: 80533250009

Distribuído por:
Asfer Ind. Química LTDA.
CNPJ: 04.798.379/0001-88
Avenida Araguaia, 180 - Santa Maria - Cep: 09560-580
São Caetano do Sul-SP-Brasil - Sac: (11) 4222-3140
asfer@asfer.ind.br



INSTRUÇÕES DE USO: PROVISTESIM

Conteúdo:

Pote contendo 10g
Pote contendo 20g
Pote contendo 25g
Pote contendo 35g
Embalagem com 20 unidades contendo 10g
Embalagem com 20 unidades contendo 20g
Embalagem com 20 unidades contendo 25g
Embalagem com 20 unidades contendo 35g

Composição :

Óxido de zinco
Sulfato de zinco
Sulfato de cálcio
Acetato de polivinila
Mentol
Dibutyltalato

Especificações e características técnica do produto:

Provistesim é um material para obturações provisórias, pronto para uso, livre de eugenol que endurece rapidamente na boca ao contato com a saliva. Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal. Não tem efeitos prejudiciais sobre a gengiva e a polpa (produto não irritante).

Indicação e finalidade:

A quantidade necessária de Provistesim deve ser retirada do recipiente e aplicada diretamente na boca sem requerer mistura.

O endurecimento se processa sob a ação da saliva, sendo o produto um pouco desidratante durante o processo de endurecimento, o que pode causar ligeira sensibilidade à dentina.

Em casos onde as cavidades são muito profundas não é necessário preenchê-las inteiramente. Mais tarde isto permitirá retirar-se mais facilmente a massa antes do próximo tratamento. Em lugares expostos é recomendável observar um intervalo de 15 minutos ao máximo.

Precauções e Cuidados especiais:

Após aberto, manter a embalagem hermeticamente fechada, pois o produto absorve umidade.

Exclusivamente para uso profissional.

Não utilizar sem antes verificar a inviolabilidade do produto na embalagem.

Manipular o material adequadamente levando-se em conta a fragilidade natural do produto.

Atentar para as instruções de uso antes de proceder a utilização do material.

Evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares. Mantenha em local seco e fresco ao abrigo de luz.

Não ingerir, caso ocorra, procurar orientações médicas.

Todo medicamento deve ser mantido

fora do alcance das crianças.

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

Não deve ser usado como restaurador permanente.

Caso comprovada sensibilidade ao produto, suspender o uso.

Não apresenta reações adversas dignas de nota.

O Fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta.

Contra indicações e advertências:

Não há contra-indicações quando Provistesim é utilizado por um profissional de Odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto em pacientes que possuem histórico de sensibilidade a qualquer um dos seus componentes, recomendamos não fazer uso.

Não deve ser usado como restaurador permanente.

Não ingerir, caso ocorra, procurar orientação médica.

Armazenagem:

Armazenar e conservar o produto em local seco e arejado sem grandes variações de temperatura. Evitar locais úmidos, descobertos, expostos a luz e calor, pois podem sofrer deterioração de cor e odor.

Validade: 36 MESES