




Produzido por:
LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 05.076.414/0001-18
Rua Guarujá, 261 - Jardim Alpino - CEP: 15810270
Catanduva - SP - BR
Resp. Técnica:
Angélica Cacciari de Campos
CRF/SP: 41.250
Reg. ANVISA N°: 80533250004

Distribuído por:
Asfer Ind. Química LTDA.
CNPJ: 04.798.379/0001-88
Alameda Araguaia, 180 - Santa Maria - Cep: 09560-580
São Caetano do Sul-SP-Brasil - Sac: (11) 4222-3140
asfer@asfer.ind.br 
Química Responsável:
Sônia Regina Faria
CRQ N° 04112441 - IV Região

INSTRUÇÕES DE USO: PULPOSPHARMA Pó e Líquido

Cimento odontológico forrador temporário de cavidades dos dentes.

Conteúdo:

Pulpospharma Pó: 1 caixa contendo 1
Pote com 50g do pó
Pulpospharma Líquido: 1 caixa
contendo 1 Frasco líquido com 20ml do
líquido

Composição:

Pulpospharma Pó:
óxido de Zinco
Sulfato de Bário
Fosfato de Cálcio
Acetato de Zinco

Pulpospharma Líquido:

Timol
Álcool Etilico
Eugenol

Especificações e características técnica do produto:

O produto é constituído por um pó
branco, levemente acinzentado e
um líquido límpido, levemente
amarelado, odor característico
(predominante do eugenol),
isento de partículas em suspen-
são ou sedimentos.

**Indicação e finalidade:**

É empregado em diversas aplicações como: forrador de cavidades, curativo selante, base sedativa e cimentação temporária de coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias quando remoções são planejadas, deixando o remanescente para servir de base intermediária sob restaurações permanentes.

Aplicação correta e segura do produto:

Deve ser preparado na consistência desejada pelo profissional dentista, alterando-se somente as proporções do pó e do líquido. Como forrador de cavidades: A proporção recomendada é de 2 medidas de pó para 1 de líquido, deve se iniciar a espatulação para que o pó e o líquido se misturem completamente. Essas medidas variam de acordo com a quantidade que o dentista precisará no momento do uso. Como cimento temporário: A proporção recomendada é de 3 medidas de pó para 1 de líquido, deve se iniciar a espatulação para que o pó e o líquido se misturem completamente. Essas medidas variam de acordo com a quantidade que o dentista precisará no momento do uso.

Precauções e Cuidados especiais:

Não proceder da utilização sem antes de verificar a inviolabilidade do produto na embalagem.
Manipular o material adequadamente levando-se em conta a fragilidade

natural do produto.

Atentar para as instruções de uso antes de proceder à utilização do material.

Evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares.

Não deve ser usado como restaurador permanente.

Caso seja comprovada sensibilidade ao produto, suspender seu uso.

Não apresenta reações adversas dignas de nota.

Mantenha em local seco e fresco e ao abrigo da luz.

Guardar o frasco líquido do Pulpospharma longe dos cimentos e resinas em gerais, já que sendo constituído principalmente de eugenol, os vapores podem alterar fisicamente e quimicamente as propriedades desses produtos.

Não ingerir, caso ocorra procurar orientação médica.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Não utilizar com o prazo de validade vencido.

Exclusivamente para uso profissional.

Contra indicações e advertências:

Não há.

Armazenagem:

Conservar em temperatura ambiente.

Validade: 24 MESES