



ASFER Indústria Química LTDA

Produzido por:
LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 05.076.414/0001-18
Rua Guarujá, 261 - Jardim Alpino - CEP: 15810270
Catanduva - SP - BR
Angélica Cacciari de Campos
CRF/SP: 41.250
Reg. ANVISA N°: 80533250009

Distribuído por:
Asfer Ind. Química LTDA.
CNPJ: 04.798.379/0001-88
Alameda Araguaia, 180 - Santa Maria - Cep: 09560-580
São Caetano do Sul-SP-Brasil - Sac: (11) 4222-3140
asfer@asfer.ind.br 

INSTRUÇÕES DE USO: RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO Pó e Líquido

Conteúdo:

Frasco de vidro âmbar de 15ml.
Frasco de plástico polietileno com
40g.

Composição:

R.I. Líquido
Ácido Acético Glacial 2,4%
Álcool Etilíco p.a. 20%
Eugenol puro q.s.p. 100%

R.I. Pó

Óxido de Zinco 56,0%
Sulfato de bário 11,0%
Fosfato de Cálcio 1,5%

Acetato de Zinco 1,5%
Resina Acrílica 30,0%

Especificações e características técnica do produto:

O *R.I. Restaurador Intermediário pó*
- é um pó de cor marfim

O *R.I. Restaurador Intermediário Líquido* - é um líquido límpido, levemente amarelado, com odor característico predominante do eugenol, isento de partículas em suspensão ou sedimentos.

Indicação e finalidade:

O R.I Restaurador intermediário líquido e pó:

É indicado para restaurações provisórias e forramento de cavidades, propiciando rápido atendimento em restaurações de emergência no controle de cáries dentárias.

Aplicação correta e segura do produto:

Antes de utilizar o pó, agite-o para assegurar a uniformidade do produto. É recomendada a proporção de 0,18gr de pó para cada gota do líquido ou de preferência do uso do profissional.

Coloque o pó na placa de vidro, e o líquido na mesma placa ao lado. Acrescentar as partes do pó ao líquido até obter a consistência preferencial.

Espatular por 20 segundos para obter uma massa densa e pouco aderente ao vidro.

O preparo cavitário deve prover retenção mecânica do material.

Isolar o dente, de preferência com isolamento absoluto; seque a cavidade com algodão. Coloque o material diretamente dentro do preparo cavitário.

Use o método convencional de aplicação de matriz quando indicado.

Remova o excesso de material.

A presa ocorre dentro de 5 minutos após o início da mistura.

O paciente deverá manter a pressão oclusal até que o R.I. tenha endurecido.

Precauções e Cuidados especiais:

Não utilizar sem antes verificar a inviolabilidade do produto na embalagem. Manipular o material adequadamente levando-se em conta a fragilidade natural do produto. Atentar para as instruções de uso antes de proceder a utilização do material. Evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares. Mantenha em local seco e fresco ao abrigo de luz. Não ingerir, caso ocorra procurar orientações médicas.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Exclusivamente para uso profissional. Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

Não deve ser usado como restaurador permanente. Caso comprovada sensibilidade ao produto, suspender o uso.

Não apresenta reações adversas dignos de nota. O R.I. contém eugenol, portanto deve ser evitado o contato prolongado com a pele, olhos e mucosa bucal.

Contra indicações e advertências:

Não há.

ARMAZENAGEM: conservar em temperatura ambiente 15C a 30C
VALIDADE : 24 MESES