

Apresentação: Frasco com 10 ml.

Composição: Eucaliptol USP.

Cada frasco de 10 ml contém:
Eucaliptol 10 ml

Características:

O Eucaliptol é utilizado para dissolver a gutta-percha, sendo pouco irritante e apresentando atividade antibacteriana.

O Eucaliptol é obtido da essência de eucalipto e de outras fontes produtoras. É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguido de sensação de frescor. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.

Instruções de uso:

- colocar uma gota do produto na entrada do conduto radicular e esperar 5 minutos para que o Eucaliptol amoleça o cone de gutta-percha;
- com o auxílio de uma lima endodôntica vá instrumentando e retirando o cone de gutta-percha;
- coloque novamente o Eucaliptol, quando perceber que o cone de gutta-percha remanescente estiver seco ou quebradiço;
- repita a operação enquanto for necessário.

Observações:

Para melhores resultados utilizar o Eucaliptol puro. A mistura com outros produtos pode tornar a operação muito lenta.

Precauções:

Mantenha em local seco e fresco e ao abrigo da luz. Exclusivamente para uso profissional. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças. Não ingerir, casos de ingestão, exposição da pele ou pessoas submetidas a alta concentração de seus vapores, encaminhar a atendimento médico. Não utilize produtos fora do período indicando na validade.

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA.

Nº do lote, data de fabricação e validade - vide cartucho e rótulo.



Química Responsável: Sonia Regina Faria Cardoso
CRQ Nº 04112441 - IV Região - Reg. ANVISA/MS 80117920009
Aut. Func. ANV. Nº UY54YX53L710 - CNPJ: 04.798.379/0001-88
INDÚSTRIA BRASILEIRA